

Ambulatory Traction Belt Disk Dr. CS300

CS300 (경추용) 사용 설명서

수동식 공기주입식 정형용 견인장치

본 제품은 의료기기입니다



창의메디칼㈜의 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품을 안전하고 바르게 사용하기 위하여 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

▷구 성 품



목 지지대



견인벨트



핸드펌프

▷제품취급 주의사항

- 주입공기의 압력은 절대로 12psi(펌프의 게이지 노란색 지시선)를 넘지 않도록 하십시오.
- 과도한 공기주입으로 인해 제품이 파손될 경우, 제품 파열과 함께 큰 소리가 발생할 수도 있으므로 반드시 적정압력을 주입하시기 바랍니다.
- 기기의 고장을 발견하였을 경우, 즉각 사용을 중지하십시오.
- 무리한 힘을 가하거나, 공기주입구에 이물질들을 넣을 경우, 제품이 파손될 수 있습니다.
- 절대 임의대로 제품을 개봉하거나 변형하지 마십시오. 임의대로 개조시 A/S를 받으실 수 없습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 벨트가 날카로운 물건이나 난로 등 고온의 화기 부근에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 온도, 습도가 높지 않은 곳, 직사광선이 비치지 않는 곳에 보관하여 주십시오.



[CONTENTS]	• 주의사항	03
	• 착용 전 체크사항	04
	• 효과적인 착용방법	05
	• 세탁 시 주의사항	06
	• 품질보증서	07

▶ 제품관련 기재사항

- 제품명 : 수동식 공기주입식 정형용 견인장치
- 모델명 : CS300
- 제조업허가번호 : 제 651호
- 의료기허가번호 : 제신11-180호
- 재 질 : 벨트내부 - 면, 벨트 외부 - 합성피혁, 펌프 - 플라스틱 외
- 색 상 : 본체 - 그레이, 펌프 - 그레이
- 무 계 : 본체 270g, 펌프 250g
- 에어펌프 공급압력 : 적정압력 12psi
- 효능/효과 : 추간판 탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료를 목적으로 공기주입을 통하여 경추를 견인
- 보증기간 : 구입일로부터 1년 무상보증

▷ 효과적인 착용방법



1번 ~ 4번

1. 견인벨트의 한쪽 부착면을 목 지지대의 한쪽 부착면에 부착시킵니다.
2. 턱을 목 지지대 안쪽의 턱 받침대에 맞춥니다.
3. 견인벨트의 나머지 부착면을 목 지지대의 나머지 부착면에 부착시킵니다. (전체적으로 목에 두른 형태)
4. 턱과 뒷목에 견인벨트가 밀착되도록 양쪽 견인장치 부착면을 조정합니다.
 - 헐렁하게 부착할 경우 턱이 밀착되지 않아 견인효과가 떨어지고 반대로 너무 조일 경우 가슴 날개뼈와 목 부분이 불편할 수 있습니다.



5번 ~ 7번

5. 펌프의 공기주입구 부분을 견인벨트의 공기주입구 홈에 맞추어 연결합니다.
6. 펌프 손잡이를 상하로 왕복시켜 공기를 압력계 바늘이 녹색 표시에 도달할때까지 주입합니다. (공기압력:10 ~ 12psi)
 - 공기압력이 절대 녹색 ~ 노란색 표시를 넘지 않도록 합니다. 과도한 공기압 주입은 벨트 내부를 파손시킬수 있습니다.
7. 펌프의 집게를 눌러 공기주입구에서 펌프집게를 제거하면 착용이 완료된 것입니다.
 - 체결집게 제거시 공기가 빠지는 소리가 날수 있으나 정상입니다.



주의사항

착용을 마친 후에 제품을 풀어놓으실 때에는 먼저 공기배출 나사를 시계 반대방향으로 조금 돌려 벨트에서 공기를 완전히 배출한 후, 제품을 풀어 놓으십시오.



▷ 꼭 읽고 사용해주세요

- 심한 고혈압, 심장질환 환자, 뇌혈관 환자는 전문의와 상의후 착용하시기 바랍니다.
- 신체에 이상이 발생하였을 경우, 즉각 사용을 중지하시고 의사와 상담하십시오.
- 임산부, 어린이, 노약자는 사용시에 주의해 주십시오.
- 본 제품을 착용한 상태에서 목을 좌우로 심하게 움직이는 행동은 삼가하여 주십시오.
- 제품을 너무 조여서 착용할 경우 경추부분이 압박되어 불편할 수 있으니 적절히 조절하여 주십시오.
- 흉부에 과도한 압박이 오거나 호흡곤란이 올 경우 사용을 중지하십시오.

▷ 착용 전 체크사항

- 구입 후 최초 착용 시에는 다른 사람의 도움을 받으시면 좋습니다.
- 착용 전에 벨트 안에 공기가 남아있는지 확인한 후, 남은 공기를 제거하여 사용합니다.
- 공기를 제거하는 방법은 공기주입구의 배출나사를 시계 반대방향으로 돌리면 됩니다.
- 너무 많이 돌리면 배출나사가 빠질 수도 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 아침, 저녁 약 20~30분씩 하루 2번 착용하시기 바랍니다. 가급적 누워있는 상태에서는 착용하지 마시고 일과 중 앉아있을 때나 서있을 때 등 일상생활에서 착용하시기 바랍니다.
- 제품착용 후 수일 이내에 통증이 심해지는 경우가 있을 수 있습니다. 하루 착용시간을 줄이시고 2~4일 이후 통증이 약해지는 대로 착용시간을 서서히 늘리십시오.
- 피부에 직접 착용하는 것이 가장 효과적이지만 민감성 피부 등으로 어려움이 있을 경우, 얇은 수건 위에 착용하셔도 무방합니다.
- 민감성 피부로 제품 착용 시 피부에 트러블이 생기는 경우, 약국에서 판매하는 항 알레르기성 연고나 베이비 로션을 발라주시고 환부를 자주 환기시켜 주시기 바랍니다.

품 질 보 증 서

- 본 제품 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 본 제품의 하자 발생 시 구입일로부터 1년간 무상 A/S를 보장합니다.
(소비자 과실은 해당되지 않습니다.)
- 수리 및 기타 서비스 시에는 꼭 본 품질보증서를 제시하십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효하며, 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 하자 발생 시 창의메디칼(주) A/S센터로 연락하시기 바랍니다.

제품명	수동식 공기주입식 정형용 견인장치	보증기간	생산일로부터 14개월
모델명	CS300	구입금액	
구입일	년 월 일	구 입 처	

구입처	성 명		전화번호	
	주 소			

제조원 : 창의메디칼(주)

서울시 성동구 광나루로 6길 49 모터시티빌딩 601호

Tel. 02 - 454 - 8272

<http://www.diskdr.co.kr>

E-mail. master@diskdr.co.kr



▷ 세탁 시 주의사항

- 세탁 시에는 먼저 견인벨트와 목 지지대, 목 지지대 부분의 스펀지를 모두 분리합니다.
- 목 지지대 : 젖은 물수건 등을 이용하여 잘 닦아준 후 그늘에서 말립니다.
- 견인벨트 : 먼저 제품내부에 5psi정도의 공기를 주입한 후, 공기주입구를 시계방향으로 돌려 내부에 물이 들어가지 않도록 잠가주시기 바랍니다. 중성세제를 분물에 제품을 담그신 후 부드러운 스펀지를 이용하여 가볍게 문질러 세탁하시기 바랍니다. 세탁 이후 마른 천을 이용하여 조심스럽게 눌러서 물기를 제거한 후 그늘에서 말리시기 바랍니다.
- 스펀지 : 중성세제를 분물에 제품을 담그신 후 가볍게 문질러 세탁하시기 바랍니다. 세탁 이후, 마른 천을 이용하여 조심스럽게 눌러서 물기를 제거한 후 그늘에서 말리시기 바랍니다.
- 세탁 이후에는 그늘에서 건조하십시오.
- 너무 빈번한 세탁은 제품 수명에 영향을 미칠 수도 있습니다. 너무 자주 세탁하지 마십시오.
- 탈수 시, 절대 손으로 비틀어 짜거나 세탁기로 탈수하지 마십시오.
- 제품 세탁 시에는 중성세제를 제외한 화학약품을 사용하지 마십시오.
- 제품 세탁 시, 제품을 삶거나 살균하지 마십시오.
- 제품 세탁 후 건조 시, 열을 가하거나 드라이기로 말리지 마십시오.
- 공기주입구 나사를 잃어버리지 않도록 주의 하십시오.

창의메디칼(주) 주요제품

• 허리/요추용



WG50 Double
 더욱 강력해진 견인력의
 집중관리용!
 125% 강화된 견인력/ 지지범위가
 넓어 강하고 든든하게 요추를
 견인해 줍니다.



WG30 MAX
 누구나 착용 가능한 일상생활용!
 부드럽고 안정감있는 맞춤견인!
 WG30 MAX와 함께 좀 더
 편안한 하루를 약속합니다.

• 경추/목용



CS300
 목, 어깨가 아픈 환자분을
 위한 프리미엄형!
 추간판탈출증, 퇴행성협착증 등의
 치료를 목적으로 8개의
 공기기둥으로 경추를 견인!



NG20-M
 목, 어깨가 아픈 모든 분들을
 위한 일반형!
 목이 빠근하고 결린 사람들의 선택
 슬림한 마름모꼴의 견인벨트로
 누구나 OK, 어디서나 OK!

• 무릎용



JoinMAX
 지긋지긋한 무릎근육통증 개선을 위한
 신개념 무릎관절근 의료기기!
 6개의 할로겐 램프와 4개의 적외선 램프가 무릎 관절
 깊숙한 곳까지 열에너지를 침투시킵니다.