



Disk Dr.

CHANGEUI MEDICAL CO., LTD.

의료기품목허가 : 제 04-1019 호

정형용 견인장치 · 의료용 자기발생기 NG20-M(경추용) 사용 설명서



CE.FDA.


본 제품을 안전하고 바르게 사용하기 위하여 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

○ 다음사항은 경고사항입니다.

1. 심한 고혈압, 심장질환 환자, 뇌혈관 환자는 전문의와 상의 후 착용하시기 바랍니다.
2. 신체에 이상이 발생하였을 경우, 즉각 사용을 중지 하시고 의사와 상담하십시오.

○ 다음사항은 주의사항입니다. 사용시 주의바랍니다.

1. 과도한 공기주입은 제품을 파손시킬 수 있습니다. 공기의 압력은 펌프의 게이지가 노란색 지시선(12psi)을 넘지 않도록 하십시오.
2. 목적 외에는 사용하지 마시고, 전문의와 상의 후 착용하시기 바랍니다.
3. 본 제품을 착용한 상태에서 목을 좌우로 심하게 움직이는 행동은 삼가하여 주십시오.
4. 제품을 너무 조여서 착용한 경우 경추부분의 압박이 증가해 불편할 수 있으니 적당히 조절하여 주십시오.
5. 흉부에 과도한 압박이 오거나 호흡곤란이 올 경우 사용을 중지하십시오.
6. 벨트가 날카로운 물건이나 난로 등 고온의 화기 부근에 닿지 않도록 주의하십시오. 제품이 파손될 경우 제품파열과 함께 큰 소리가 발생할 수도 있으므로 주의, 참고하여 주시기 바랍니다.
7. 벨트의 내부에는 1600가우스의 의료용 자석이 장착되어 있습니다. 시계, 핸드폰, 신용카드 등 자기에 영향을 받을 수 있는 제품을 가까이 두지 마십시오.
8. 온도, 습도가 높지 않은 곳, 직사광선이 비치지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
9. 기기의 고장을 발견하였을 경우, 즉각 사용을 중지하십시오.
10. 절대 임의대로 제품을 개봉하거나 변형하지 마십시오. 임의대로 개조시 A/S를 받으실 수 없습니다.
11. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

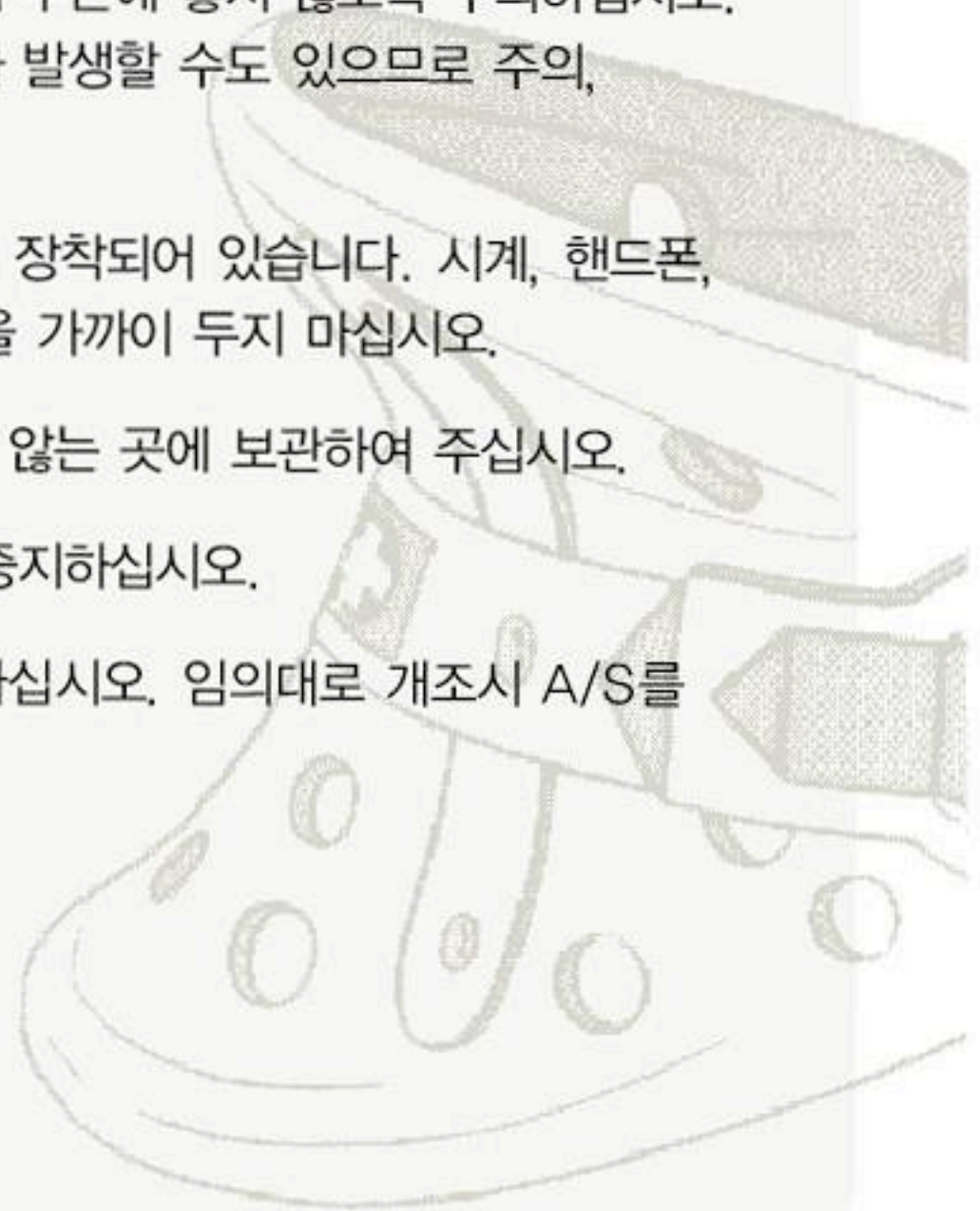

효과적인 치료를 위한 착용방법

제품포장을 뜯어 견인벨트와 목 지지대를 착용 할 수 있도록 준비 합니다.
(제품구입후 최초 착용시에는 곁에서 다른사람들의 도움을 받으시면 유용합니다.)



착용전에 벨트안에 공기가 남아 있는지 확인한 후 꼭 남은 공기를 제거하여사용합니다. 제거후에는 배출나사를 시계방향으로 돌려 잠궈주시기 바랍니다.



1. 견인벨트의 한쪽 부착면을 목지지대의 한쪽 부착면에 부착시킵니다.
2. 턱을 목 지지대 안쪽의 턱 받침대에 맞춥니다.
3. 견인벨트의 나머지 부착면을 목 지지대의 나머지 부착면에 부착시킵니다.
(전체적으로 목에 두른형태)





턱과 뒷목에 견인벨트가 밀착되도록 양쪽 견인장치 부착면을 조정합니다.

(※혈렁하게 부착할 경우 턱이 밀착되지 않아 견인효과가 떨어지고 반대로 너무 조일경우 가슴 날개뼈와 목 부분이 불편할 수 있습니다.)



펌프의 공기주입구 부분을 견인벨트의 공기 주입구 홈에 맞추어 연결합니다.

펌프의 손잡이를 상하로 왕복시켜 공기를 압력계 바늘이 녹색 표시에 도달할때까지 주입합니다. (공기압력 10~12psi)

※주의사항 : 공기압력이 절대 녹색-노란색 표시를 넘지 않도록 합니다. 과도한 공기압 주입은 벨트 내부를 파손시킬수 있습니다.



펌프의 집계를 눌러 공기주입구에서 펌프집계를 제거하면 착용이 완료된 것입니다.

(체결집계 제거시 공기가 빠지는 소리가 날 있으나 정상입니다.)



세탁방법

세탁시에는 먼저 견인벨트와 목 지지대를 분리합니다.



목 지지대는 젖은 물수건등을 이용하여 잘 닦아준 후 그늘에서 말립니다.

1. 세탁기를 이용한 세탁방법

견인벨트는 공기주입구의 나사를 잘 돌려 막은 후 세탁 주머니 안에 넣어 세탁기를 이용하여 약 5분간 세탁합니다.




2 손세탁방법

손세탁 시에는 견인벨트에 약 5psi 의 공기를 주입한 후 중성세제를 푼 물에 담가 부드러운 스폰지등을 이용하여 세탁합니다.

세탁 후에는 그늘에서 건조 시키십시오.

Memo.

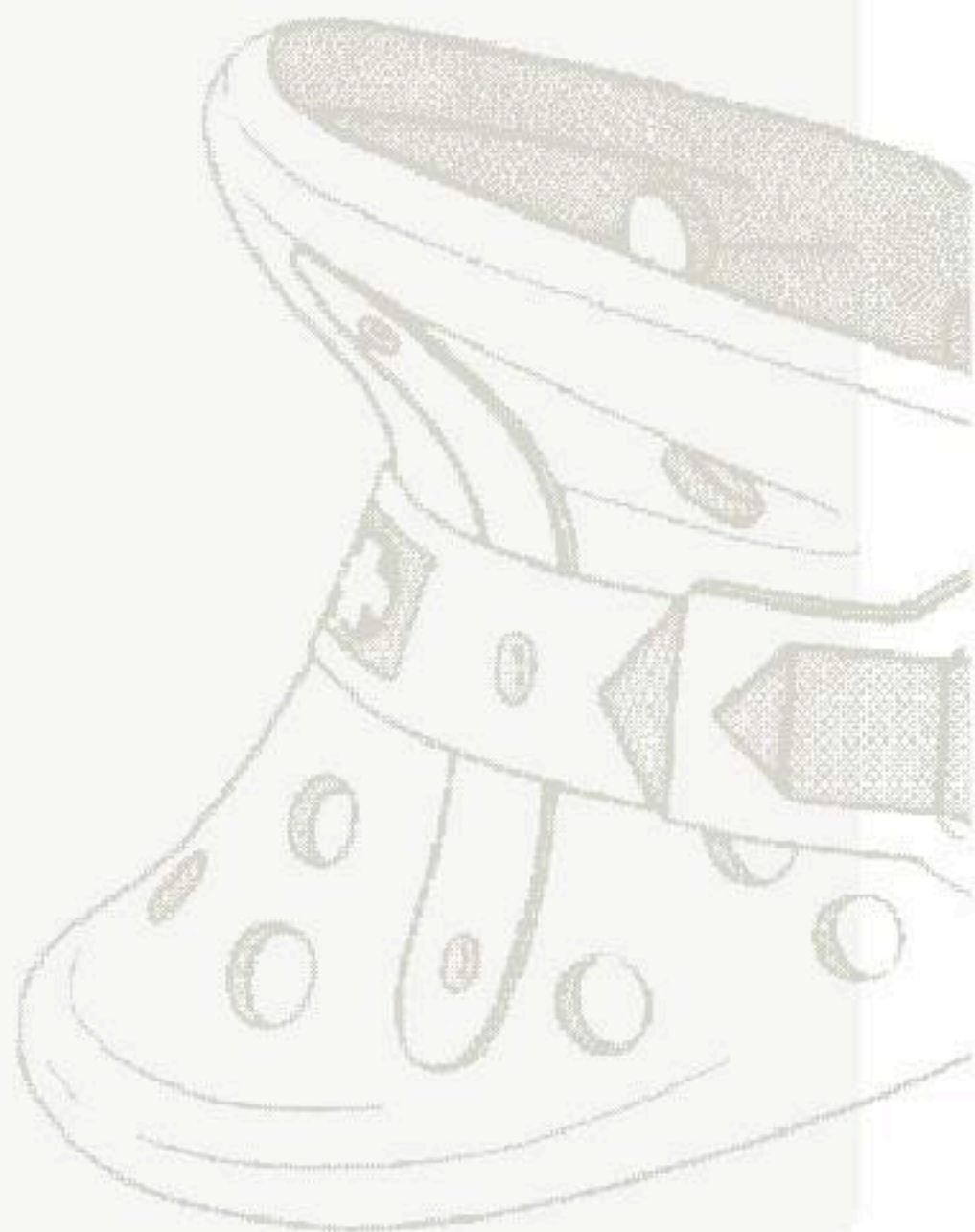


품질보증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 본 제품의 하자 발생시 생산일로부터 14개월간 무상 A/S를 보장합니다.
(소비자 과실은 해당되지 않습니다.)
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 수리 및 기타 서비스 시에는 꼭 본 품질보증서를 제시하십시오.
- 보증서는 재 발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 하자 발생시 A/S 센터로 연락하시기 바랍니다.

제 품 명	정형용 견인장치 · 의료용 자기발생기		보증기간	생산일로부터 14개월간
제품모델명	NG20-M	규 격	일련번호	
구 입 일	년 월 일		구입금액	
구 입 처			A/S센터	02-454-8272

구 입 자	성 명			전화번호	
	주 소				

■ 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않습니다.

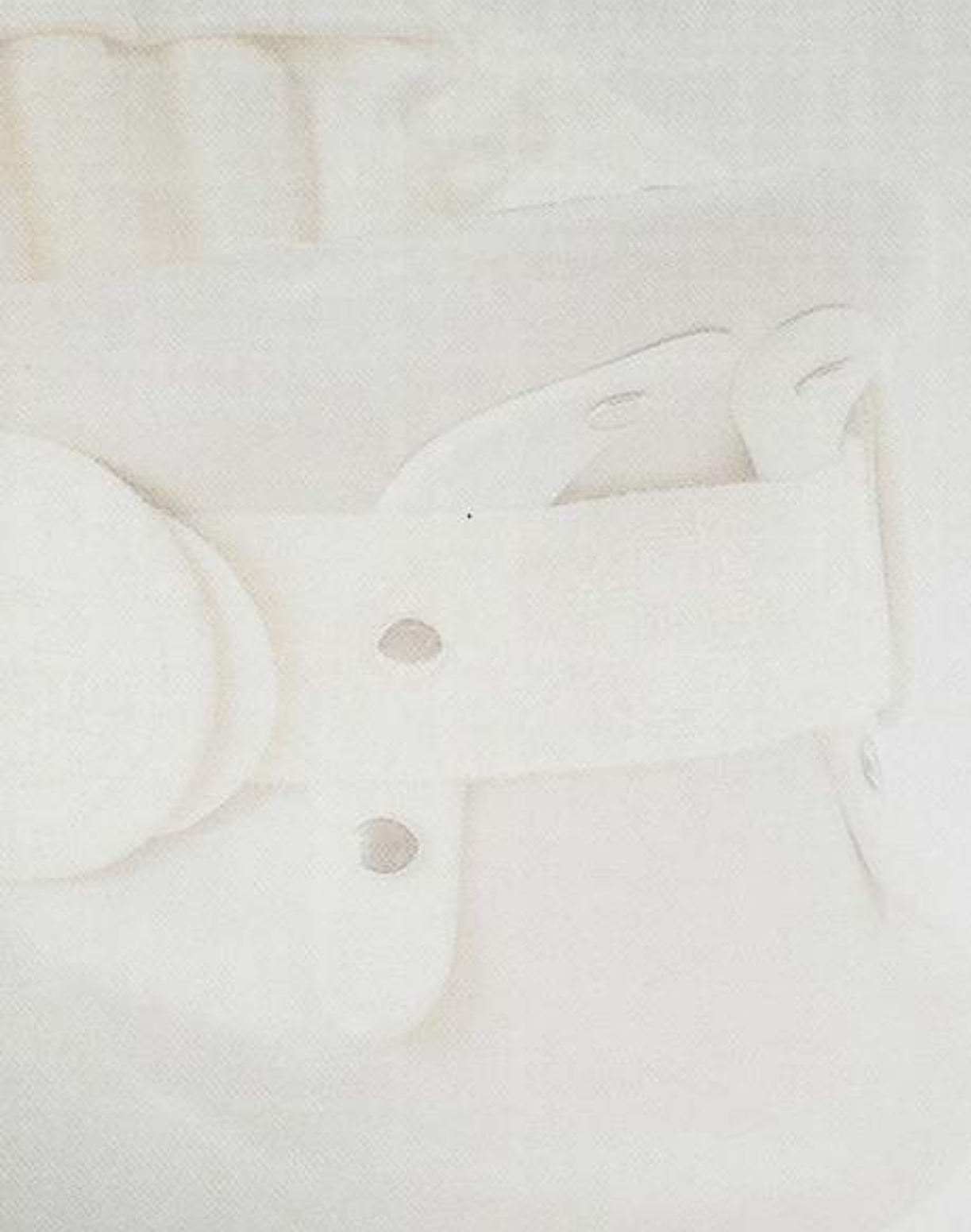

Disk Dr.

Disk Dr.

CHANGEUI MEDICAL CO., LTD.

제조원 : 창의메디칼(주)

주소 : 서울 성동구 광나루로6길 49 모터시티빌딩601호

전화 : 02-454-8272

E-mail : master@diskdr.co.kr

<http://www.diskdr.co.kr>